

携帯型心電計チェックミー



Checkme **ECG** ADV

チェックミー ECG アドバンス



Checkme **Lite** ADV

チェックミーライト アドバンス

なんだか
息苦しい...

胸が
ドキドキ
する...

胸に
圧迫感が
ある...

不整脈が 気になる方へ

病院で測定しても
その時は正常な心電図って
言われるけども...
胸の痛みなど時々、
違和感を感じる...

そんなあなたにおすすめ！
いつでも気になる時に
心電図をチェックできる！
くわしくはこちら 

携帯型心電計

チェックミーで測定できること



心電計

チェックミー ECG アドバンス

チェックミーライト アドバンス



バックライト付きカラー液晶ディスプレイを搭載。

暗いところでも心電図の確認が可能です。

持ち歩いていつでもどこでもすぐに取り出して測定ができるポケットサイズの携帯型心電計。

異常時の心電図を記録して主治医の先生に見ていただきましょう！



パルスオキシメータ

チェックミーライト アドバンス



指をそっと添えるだけで、血中の酸素飽和度を測ることができます。



デイリーチェック

チェックミーライト アドバンス



心電図と血中酸素飽和度を同時に測定できます。測定結果は4名まで個別に記録できるので、ご家族の方もご使用いただけます。

[心電計に限定したシンプルなモデル]

Checkme ECG ADV

チェックミー ECG アドバンス

オープン価格



測定できること： 

測定記録は本体に100件保存。スマートフォンやパソコンがなくても使用できます！

[心電計とパルスオキシメータ搭載のモデル]

Checkme Lite ADV

チェックミーライト アドバンス

オープン価格



測定できること：   

付属品



充電用USBケーブル

USB接続で充電を行います。
パソコンとの接続にも使用します。



充電アダプタ

充電用USBケーブルを接続し、
コンセントで充電を行います。



ネックストラップ

チェックミーのストラップホールに紐を通して使用します。

別売品



誘導コード PC-02V

6,600円(税込)
ST測定値を測定するために心電図用電極と組み合わせて使用します。



【メッツ社製】心電図用電極 ホワイトセンサー WS/RT

50個入 3,080円(税込)
600個入 36,960円(税込)
誘導コードと組み合わせて使用します。



パルスオキシメータ プローブ VP-01

16,500円(税込)
パルスオキシメータの測定に使用します。




シリコンケース

1,100円(税込)
フィット感抜群で滑りにくい、やわらかなシリコンカバー。

装着イメージ



チェックミーライトアドバンスにシリコンケースを装着し、スラップバンドで腕に固定した上で、パルスオキシメータプローブを用いて血中酸素飽和度をモニタリングします。

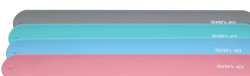

スラップバンド(4色)

各色 1,100円(税込)
「シリコンケース」に取り付けることで、ワンタッチで腕に装着することができます。

誘導コードと心電図電極を使用した測定

別売の誘導コードと心電図電極を使用した測定方法では医師の診断に役立つST測定値の結果も表示します。



I 誘導測定

チェックミー ECG アドバンス

チェックミーライト アドバンス



II 誘導測定

チェックミー よくある質問

Q：測定後、気になる結果が出た場合はどうすればいいの？

A：チェックミーを持参して、異常時の記録を主治医の先生に見ていただきましょう。

Q：ちゃんと測定できるか不安です…

A：チェックミーの画面をタッチで項目を選択後、指や手のひらを添えて30秒待つだけで簡単に測定できます。
測定結果もわかりやすく表示されます。

Q：測定結果を印刷したいんだけど…

A：スマートフォンやパソコンをお持ちの方は、それぞれ接続して測定結果を印刷することが可能です。
詳しくは下記のWebサイトをご覧ください。

チェックミーをさらに知りたい方はこちら動画やイラストでくわしくご紹介しています！

Checkme特設サイト

<https://checkme.jp/>



製 品 仕 様

	チェックミー ECG アドバンス	チェックミーライト アドバンス
寸法 (本体)	88mm (幅) × 56mm (高さ) × 13mm (厚さ)	
重量 (本体)	60g	
ディスプレイ	2.4インチタッチスクリーン	
電源	充電式リチウムイオンバッテリー 3.7V	

機能

心電計	○ 誘導コード (別売) 使用時ST表示	○ 誘導コード (別売) 使用時ST表示
パルスオキシメータ	—	○ パルスオキシメータプローブ (別売) 使用可能
デイリーチェック	—	○
音声案内	—	○
パソコンアプリ	○	○
スマートフォンアプリ	○	○

付属品

充電用USBケーブル	○	○
充電アダプタ	○	○
ネックストラップ	○	○

販売名: 携帯型心電計 Checkme ECG
医療機器認証番号: 230AABZX00020000
一般の名称: 発作時心臓活動記録装置
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者: 三栄メディシス株式会社
D208 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点

販売名: ヘルスマニター Checkme Lite
医療機器認証番号: 227AABZX00037000
一般の名称: 発作時心臓活動記録装置 / パルスオキシメータ
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者: 三栄メディシス株式会社
D208 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定 35点

販売名: 誘導コード PC-02V
医療機器届出番号: 26B2X00004000019
一般の名称: 心電計ケーブル及びリード
一般医療機器
製造販売業者: 三栄メディシス株式会社

販売名: ホワイトセンサー WS/RT
医療機器届出番号: 13B2X00117000025
一般の名称: 単回使用心電用電極
一般医療機器
製造販売業者: 株式会社メッツ

販売名: パルスオキシメータプローブ VP-01
医療機器届出番号: 26B2X00004000020
一般の名称: 再使用可能なパルスオキシメータプローブ
一般医療機器
製造販売業者: 三栄メディシス株式会社

- ◆測定結果の自己診断・治療は危険です。
測定結果 (心電図波形・SpO2) や表示されるメッセージについては自己判断せず、必ず医師にご相談ください。
- ◆本製品での測定結果は、測定した時点での測定結果です。
本製品の測定結果に関わらず、自覚症状がある場合には医師にご相談ください。
- ◆本製品の測定結果だけですべての病気や疾患の識別ができるものではありません。
「基準値」以外の測定結果が表示され、自覚症状がある場合は必ず医師にご相談ください。

保証期間

ご購入より1年

掲載内容は2025年8月1日現在のものです。



三栄メディシス株式会社

〒 607-8116 京都市山科区小山鎮守町14-1
TEL:075-502-0066 FAX:075-502-0068