



GOOD
DESIGN

携帯型マルチヘルスマニタ

Checkme Pro B ADV

チェックミープロB アドバンス



院内でも、往診でも。

いつでも確かな心電図記録、
バイタルチェックを
この一台に。



Windowsパソコン / スマートフォン アプリに転送

診療報酬点数

携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点
経皮的動脈血酸素飽和度測定 35点
終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点

チェックミープロB アドバンス オープン価格

販売名:ヘルスマニタ Checkme Pro
認証番号:227AABZX00038000
一般の名称:発作時心臓活動記録装置,パルスオキシメータ,皮膚赤外線体温計
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者:三栄メディシス株式会社

保証期間

ご購入より1年

Checkme Pro B ADV の
詳しい情報はこちらの二次
元コードからアクセスして
ください



<https://www.checkme.jp/checkme-prob-adv/>

心電計


自覚症状が出たらすぐに測定

I・II誘導測定が可能です。



別売りの誘導コードを使った測定も可能です。

誘導コードを使用した測定方法ではST測定値の結果も表示します。

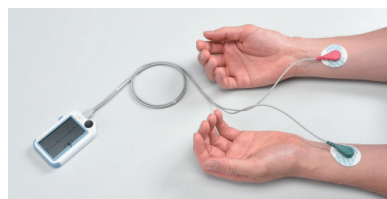

パルスオキシメータ ストレスフリーの測定方法

指をそっと添えるだけ。

クリップで「ギュッ」と挟むタイプではなく、圧迫を感じない測定機器なのでいつでも気軽に測定できます。指が細い女性やお子様にも対応しています。



別売りのパルスオキシメータプローブを使った測定も可能です。



デیلیーチェック 毎日の健康チェックに

心電図とSpO2を同時に測定。

手のひらの中で30秒簡単チェック。



体温計

体温測定をもっと気軽に

たった2秒、こめかみで体温測定。

こめかみにセンサーをあてて2秒で体温を測ります。こめかみ辺りをスキャンするようにセンサーを移動させることで一番高い温度を表示します。触れなくても2cm以内なら測定できます。



8時間トレンド

「心電図+SpO2」8時間連続測定

心電図とSpO2を同時に最大8時間まで測定可能です。

睡眠中など長時間の測定ができることで、短時間の測定では得られなかった様々な症状の早期発見にもつながる機能です。



SpO2が90%以下に低下した回数・時間を結果画面で表示します。

通常、睡眠時は95%ほどですが、無呼吸状態になると90%以下になります。

※「心電図+SpO2」8時間連続記録には、別売の「心電オキシアダプタ」、「誘導コード」、「心電図用電極」、「パルスオキシメータプローブ」、「シリコンケース」及び「スラップバンド」が必要です。8時間心電図はWindowsアプリケーション(無料)にて表示を行います。(本体では確認できません)

【付属品】充電用USBケーブル / 充電アダプタ / ネックストラップ 【オプション品】誘導コード 6,600円(税込) / 心電図用電極50個入り 3,080円(税込) / パルスオキシメータプローブ 16,500円(税込) / シリコンケース 1,100円(税込) / スラップバンド 1,100円(税込) / 心電オキシアダプタ 27,500円(税込)



ProB ADV, ProX用アプリ

チェックモニタ


Check Monitor

無料でダウンロードしていただけます!

大きな画面で見やすい!



Bluetooth通信でタブレットやスマートフォンに、測定中のバイタル情報をリアルタイムに表示!

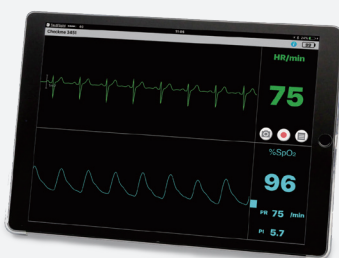

チェックミー本体に誘導コードとパルスオキシメータプローブを使用し、お持ちのタブレットやスマートフォンにBluetooth通信でつなぐことで、常に心電図と動脈血酸素飽和度を測定します。大きな画面で測定値が見やすく状態の変化に気づきやすいです。

※チェックミー本体が満充電時で連続最大10時間ほど
※状態変化をお知らせするアラームなどの機能はありません。
※チェックモニタには、別売の「心電オキシアダプタ」、「誘導コード」、「心電図用電極」、「パルスオキシメータプローブ」、「シリコンケース」及び「スラップバンド」が必要です。

対応OS: iPadOS/iOS15.0以上 | Android11.0以上

※アンドロイドの機種によってはご使用いただけない場合があります。

Me SAN-EI 三栄エディシス株式会社

〒607-8116 京都市山科区小山镇守町14-1
TEL:075-502-0066 FAX:075-502-0068