




リング型パルスオキシメータ「チェックミーリング」 睡眠中の血中酸素飽和度測定方法



丸印が左側に来る向きで、
親指などサイズがフィットする
箇所に装着します。

※関節部分を避けて装着ください。
※中指は正確に測定できない傾向
があるため、お勧めしません。

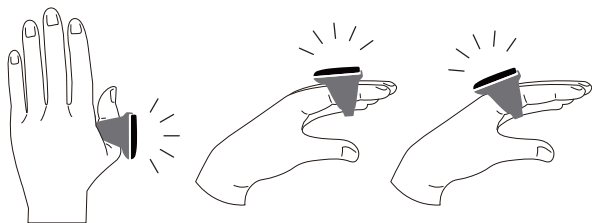

※液体に浸したり、濡らしたりしないでください。
※過度な力を加えたり、落下させたりしないでください。
※新生児、乳幼児には使用しないでください。



指に装着すると自動的に測
定が始まりますので、そのま
まお休みください。



起床後、指から外してください。
しばらくすると電源がオフに
なります。
この状態でチェックミーリン
グをお持ちください。

※睡眠中の測定後は再測定しないでください。(指に装着しないでください。)
再測定すると睡眠中データが上書きされ、削除される場合があります。
(本体には4件分のデータが保存でき、5件目を取ると最初の1件目が削除されます。)